



Débits de boissons alcoolisées :  
Les solutions Drivecase, l'expert de la  
prévention routière, pour respecter la nouvelle  
obligation de vendre des éthylotests

**drivecase.**

# Une nouvelle loi pour les débits de boissons à compter du 26 juin 2020

Aujourd'hui encore, l'alcool est la deuxième cause de mortalité sur les routes. Il représente chaque année environ 30% des accidents ([sources](#)).

Pour lutter contre ce fléau, la loi impose aux conducteurs d'avoir un taux d'alcoolémie inférieur à 0,5 g/l (soit 0,25 mg/l d'air expiré) ou 0,2 g/l (soit 0,1 mg/l d'air expiré) pour les détenteurs d'un permis probatoire.

**A compter du 26 juin 2020, la [loi d'orientation des mobilités](#) impose à tous les débits de boissons à emporter en France (à savoir les épiceries, grandes surfaces et ventes à distances) de proposer des éthylotests à la vente à proximité de leurs rayons d'alcool.**

Mais quels modèles choisir ? Comment séduire les conducteurs tout en valorisant son image de marque ? Quelles alternatives modernes et éco-responsables existent sur le marché ?

[Drivecase](#), une société française spécialisée dans la prévention routière, propose des éthylotests "nouvelle génération" : normés NFX et NF, ils sont sans ballons, écologiques, Made in France, pratiques et personnalisables.



# L'éthylotest

by Drivecase : une nouvelle marque d'éthylotests innovants et faciles à utiliser.



Fini le ballon en plastique polluant et très long à utiliser !

L'éthylotest est une nouvelle marque d'éthylotests chimiques sans ballons. Très faciles à utiliser, ils permettent d'estimer le taux d'alcool dans le sang à partir de l'air expiré par la personne à dépister.

Le concept est simple :

- 1 Il suffit de souffler dans un petit embout buccal biodégradable ;
- 2 d'attendre 2 minutes 30 environ
- 3 et, hop, la personne connaît presque instantanément son taux d'alcoolémie.

# Des éthylotests normés **NF** et **NFX**



**#JeRentreSafe** : un design moderne et personnalisé pour une communication impactante.



Tous sont **normés NFX** (pour les modèles 0,2 g/L de sang et modèles 0,5 g/L de sang) et **NF** (pour les modèles 0,5 g/L de sang uniquement), répondant ainsi aux exigences qualités des législations françaises et européennes (notamment vis-à-vis du Chrome – règlement **REACH**). Il existe donc des éthylotests adaptés à tous les profils de conducteurs.

**#JeRentreSafe** (= Je rentre en sécurité) est un hashtag qui incite l'utilisateur à se responsabiliser. Moderne, il s'inscrit dans une démarche de communication positive et bienveillante, qui met l'accent sur la prévention (plutôt que sur la peur d'une sanction).

Ces éthylotests sont totalement personnalisables (couleurs, textes, ajout de logos...) , que ce soit :

- 1 au niveau de la notice (personnalisation Simple)
- 2 ou au niveau du packaging (personnalisation Premium).

Tous sont équipés d'un code barre pour faciliter la vente directe dans les débits de boissons mais aussi les autres magasins.



# Des éthylotests **personnalisés** et **rapides à utiliser**

La société Drivecase souligne :

|| *Nous avons divers clients intéressés par ce type d'outils de dépistages : des compagnies d'assurances, des collectivités, des organismes d'Etat, des entreprises mais également des événements comme des festivals. Le public visé est toujours plus sensible aux accessoires personnalisés qu'on leur offre, cela montre un intérêt de nos clients pour la sécurité de leurs publics.*



Drivecase propose également des présentoirs adaptés pour la vente de ses éthylotests en magasins.

|| *De nombreuses personnes utilisent mal les éthylotests chimiques car elles ignorent qu'il faut les réchauffer avant de les utiliser. C'est pourquoi nos éthylotests sans ballons ne nécessitent de temps de chauffe très long, et sont rapides à interpréter, pour des résultats plus fiables.*



# Des éthylotests faciles à utiliser

Utiliser les éthylotests Drivecase est un jeu d'enfant puisqu'il suffit de :

- 1 Réchauffer l'éthylotest dans ses mains durant 30 secondes.
- 2 Perforer ses deux extrémités à l'aide de l'embout buccal.
- 3 Insérer l'embout buccal du côté de l'anneau rouge de l'éthylotest.
- 4 Inspirer profondément puis souffler jusqu'à ce que la pastille devienne blanche.
- 5 Attendre quelques instants que la pastille redevienne rouge pour lire le résultat.
- 6 Si le composant devient vert : la personne est positive et elle ne peut pas prendre le volant. S'il ne change pas de couleur bravo ! Le test est négatif et il est possible de conduire.



#JeRentreSafe : Sauver des vies et protéger l'environnement

Les éthylotests #JeRentreSafe sont écologiques puisqu'ils fonctionnent sans ballons et que leur embout buccal est **biodégradable**.

Ils sont aussi fabriqués en France, ce qui présente de nombreux avantages :

- garantie de qualité et de respect des normes ;
- diminution de la pollution liée aux transports ;
- contribution au dynamisme de l'économie locale (création d'emplois, valorisation des savoir-faire...).

Retrouvez le guide d'utilisation en vidéo sur la chaîne Youtube de Drivecase !

<https://youtu.be/pCJGWFFKmh0>



# Zoom sur une sélection d'éthylotests

Prix à partir de 0.79€ HT selon la référence .



Ethylotest NF personnalisé premium  
0,5 et 0,2 g/l



Ethylotest NF personnalisé simple  
0,5 et 0,2 g/l



Ethylotest neutre NF – Taux 0,5 g/l



Ethylotest neutre NFX – Taux 0,2 g/l

## A propos de Drivecase

Drivecase est une entreprise spécialisée dans la vente d'accessoires et de formations de prévention routière depuis plus de 6 ans maintenant.

Basée au cœur de Strasbourg, Drivecase propose de nombreux accessoires permettant de traiter et de sensibiliser aux diverses problématiques de sécurité routière : distracteurs, fatigue, vitesse, addictions (alcool et stupéfiants ...).

Entreprises, collectivités, associations, organismes d'Etat... la clientèle de Drivecase est très variée car la sécurité routière est un sujet qui concerne tout le monde. Les accidents de la route sont également la première cause de mortalité en entreprise.

[www.drivecase.fr](http://www.drivecase.fr)

